



## Щиток защитный лицевой, торговой марки «ZSR»

РУ №РЗН 2021/13736

---

**Модель:** ZSR-M01

**Описание:**

Защитный щиток используется для поддержания гигиены между пациентом и персоналом во время проведения медицинских процедур с целью предотвращения загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами.

Материал защитной пленки: АПЭТ-пленка, материал крепления: полипропилен.

**Указания по эксплуатации:**

Перед использованием необходимо удалить дополнительную пленку с двух сторон защитной пленки. Отверстия на обоих концах защитной пленки должны быть плотно прижаты к креплению.

**Особые указания и меры предосторожности**

1. Запрещается применение изделия в случае, если упаковка была открыта или повреждена.
2. Запрещается использование изделия в случае их загрязнения или повреждения.
3. Запрещается применение изделия по истечении срока годности.
4. Запрещается повторное применение изделия.
5. Запрещается стерилизация изделия.

**Срок эксплуатации:**

2 года с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и использования. (Дата изготовления указана на упаковке.)

**Условия хранения, транспортировки и утилизации:**

Для обеспечения безопасности и функциональности продукции ее необходимо хранить вдали от агрессивных газов, в сухом, хорошо проветриваемом и чистом помещении, вне доступа прямых солнечных лучей. Утилизация проводится в соответствии с правилами, установленными местным законодательством.

**Перечень стандартов, которым соответствует медицинское изделие**

- EN ISO 14971:2011 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям».
- ISO 13485:2016 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей нормативного регулирования».

**Страна производства:** Китай

**Производитель:**

Dongguan ZSR Biomedical Technology Co., Ltd. («Донгуан ЗСР Биомедикал Технолоджи Ко., Лтд.») 523651, 448 Qingfeng Road, Sanzhong Dist. Qingxi Town, Dongguan, Guangdong, China.

**Импортер:**

ООО «Техно Медицина» 197375, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Коломяги, ул. 1-я Утиная, д. 32 Литера Б, помещение 5-Н. Тел: 8 (800) 511-64-08